

wellion®

FRIGO

Wellion® FRIGO är det enkla, snabba och bekväma sättet att kyla ditt insulin, din insulinpump och annan medicin. För detta behövs varken elektricitet, nedkyllning eller nedfrysning. Wellion® FRIGO kan användas väldigt enkelt med hjälp av endast vatten – om och om igen.

För att försäkra konstant kvalitet och hygien vid frekvent användande, är innerfickan försedd med antibakteriell impregnering – en extra åtgärd som är väldigt viktig vid hantering av insulin och medicin.

Innehåll:

Varje förpackning består av:

1. Wellion® FRIGO Ytterficka
2. Wellion® FRIGO Innerficka fylld med kristaller

Bruksanvisning:

1. Skaka Wellion® FRIGO innerficka för att fördela kristallerna jämnt.
2. Sänk ned Wellion® FRIGO Innerficka helt i kallt vatten (Wellion® FRIGO L max 10 minuter, Wellion® FRIGO XXL maximalt 12 minuter). Sänk inte ned innerfickan i vatten längre än så. **Ett litet utsläpp av gel kan ske, torka av gelen och använd fickan som avsett.**
3. Kristallerna i kylkanalerna bygger upp en gel, innerfickan sväller och blir tjockare.
4. Efter det är det nödvändigt att torka av innerfickan för att ta bort överflödigt vatten.
5. Lägg kylt insulin i Wellion® FRIGO innerficka och placera innerfickan i Wellion® FRIGO ytterficka.

Permanent användande och förvaring:

Doppa bara Wellion® FRIGO innerficka i vatten, om gelen åter formats till kristaller. Vid permanent användning av fickan är nedsänkningstiden kortare beroende på fuktighetsgraden i kristallerna. Ta upp innerfickan ur vattnet så fort det är välfyllt igen. Ett litet utsläpp av gel kan ske, torka av gelen och använd fickan som avsett.

Förvara inte din aktiva Wellion® FRIGO längre än 24 timmar i lufttätt utrymme (ryggsäck, resväska, plastpåse etc.). Detta för att avdunstningsprincipen i fickan kräver cirkulerande luft.

Då fickorna inte används, separera innerfickan från ytterfickan för att låta innerfickan torka ordentligt. Skaka innerfickan under denna tid för att undvika att kristallerna fastnar vid varandra

